

## Produktinformation

# FROSCH Küchen Hygiene Reiniger

Art-Nr.: FRO-REIN



**3,29EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Lieferzeit: 7-14 Tage

Mehr als 10 auf Lager

Vom Hersteller Nortev Limited geprüft und freigegeben:

Hygienische Reinigungskraft für die Küche reinigt lebensmittelsauber jetzt auch unseren Flexineb® Inhalator (Maske und Vernebler).

Einheit: 300 ml Sprühflasche Ready-to-use

### Unsere Reinigungsempfehlung:

Medikamentenbecher / Vernebler: 3 Hübe « Frosch Küchen Hygiene Reiniger » in den Vernebler sprühen. Blaue Kappe schließen. Etwas einwirken lassen, schütteln und dann Inhalt wegkippen. Anschließend destilliertes Wasser einfüllen, schütteln und wegkippen. Dann noch einmal etwas destilliertes Wasser einfüllen und ca. 10 Sekunden vernebeln lassen. Dieses Vorgehen löst auch etwaige leichte Ölrückstände und hygienisiert den Vernebler, sofern er überhaupt kontaminiert war.

Maske und Aerosolkammer: Wischen Sie Maske und Aerosolkammer mit einem feuchten Tuch aus. Bei weiteren Verschmutzungen können Sie Maske und Aerosolkammer auch in die Spülmaschine stellen (bitte nicht über 35 Grad - Schonwäsche). Zusätzlich kann die Maske jederzeit mit dem « Frosch Küchen Hygiene Reiniger » eingesprüht und gereinigt werden (ACHTUNG: Keine desinfizierende Wirkung, da kein Biozid. Weitere Infos auf <http://www.frosch.de>)

### Lieferumfang

## Produktinformation

---

### Das Paket enthält:

- 300ml Frosch Hygiene Reiniger

### Pflege

---

Der Frosch-Reiniger kann für die Maske, wie auch für den Vernebler genutzt werden.

### Vernebler

Drei mal mit dem Frosch Reiniger in den Vernebler sprühen, kurz einwirken lassen, Deckel schließen und kurz schütteln, mit destilliertem Wasser ausschwenken bis alle Rückstände entfernt sind, mit destilliertem Wasser ca. 10 Sek. vernebeln, den Deckel geöffnet lassen bis der Vernebler trocken ist.

### Gewicht

---

### Frosch Reiniger

337g

---