


## Produktinformation

---

# Flexineb Auslassventil

Art-Nr.: RP-04

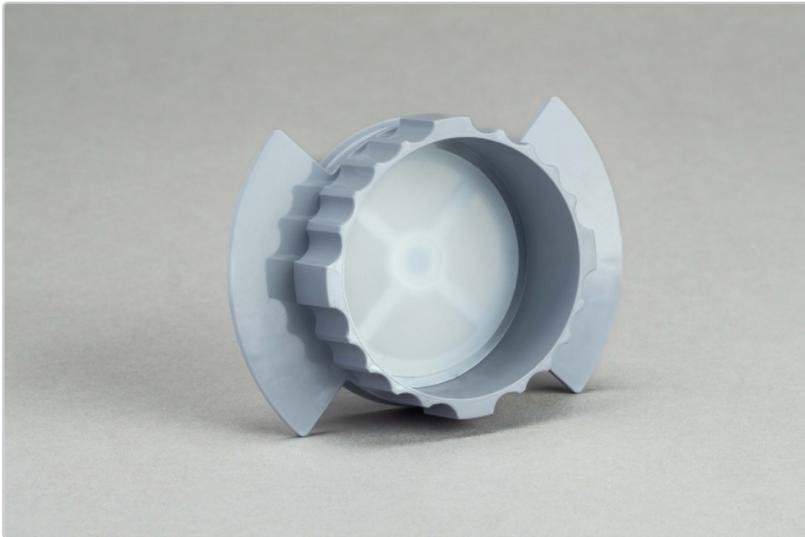


**36,95EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

🕒 Lieferzeit 3-5 Tage

Mehr als 10 auf Lager

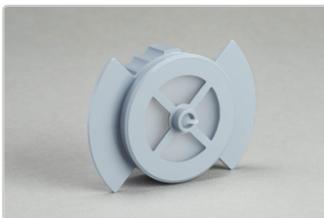

Das Auslassventil ist passend für alle Masken Modelle.

### Lieferumfang

---

#### Das Paket enthält:

- Auslassventil inkl. Ventilkummi

### Material & Pflege

---

# Produktinformation

---

## Materialien

### Auslassventil inkl. Ventilgummi

Polycarbonat & Silikonventil

## Materialpflege

### Auslassventil inkl. Ventilgummi

Mit einem feuchten Tuch oder unter laufendem, lauwarmen Wasser reinigen; das Auslassventil sollte erst nach vollständigem Trocknen verstaut werden

## Gewicht

---

### Auslassventil inkl. Ventilgummi

26g

## Anwendung

---

### Vor der Inhalation

Wenn Sie Ihr Pferd an die Inhalation gewöhnen möchten, lassen Sie das Auslassventil so lange geöffnet, bis das Pferd ruhig atmet.

### Während der Inhalation

Während der Inhalation sollte das Auslassventil geschlossen sein, damit die Inhalationsflüssigkeit nicht entweichen kann. Ihr Pferd erhält über das Einlassventil genug Luft. Im Notfall können Sie das Auslassventil einfach öffnen, oder herausnehmen

## Garantie

---

## Produktinformation

---

### Welche Garantie bietet das Flexineb®-System?

- Maske: (inklusive Aerosolkammer, aber ohne Eintritts- und Austrittsventilgummi): 12 Monate
- Ventile: sind als Verschleißteile von der Garantie ausgenommen
- Bedienungselement/Steuerungsgerät und Kabel: 12 Monate
- Akkubatterie: 6 Monate
- Netzteil: 12 Monate
- Vernebler: Im Grundsatz als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen

Durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufene Schäden fallen nicht unter den Garantieschutz. Im Fall von Manipulationen Dritter am Gerät, öffnen des Controllers oder Ähnliches erlischt der Herstellergarantieschutz.

Gleiches gilt für an- oder abgerissene Kabel (dieses kam bisher ausschließlich vor, wenn beim Abziehen des Kabels vom Steuerungsgerät oder dem Vernebler nicht an der Hülse "gezogen" wurde, sondern am Kabel selber).

Desweiteren liegt kein Garantiefall vor, wenn die Haltetaschen an der Maske ab- oder angerissen sind. Die Maske wird in einem Stück gegossen. Es gibt daher keine "Nähte" oder sonstigen Stellen, an welchen die Maske in diesem Bereich reißen kann. Die Laschen halten einer Zugkraft von 65kg Stand. D.h. nur dann, wenn die Maske hängen bleibt oder man diese festgehalten hat, während das Pferd zurückgewichen ist (alles Beispiele aus Kundendarstellungen), können diese Laschen reißen. Wir bitten um Verständnis.